

MIKROLATEST® MIC

POJEDYNCZE PANELE ANTYBIOTYKOWE

KOLISTYNA



**Jedyna właściwa metoda oznaczania
wrażliwości na kolistynę zgodnie z EUCAST**

- Ilościowe oznaczenie wrażliwości na antybiotyki
- Siedem stężeń oraz kontrola wzrostu
- Oznaczenie łatwe do wykonania
- Metoda mikrorozcieńczeń
- Interpretacja według EUCAST
- Wizualny lub automatyczny odczyt wyników

MIKROLATEST® MIC KOLISTYNA

Charakterystyka testu

- Siedem stężeń oraz kontrola wzrostu
- Metoda mikrorozcieńczeń zalecana przez EUCAST
- Możliwość odczytu automatycznego oraz wizualnego
- Prosta metoda wykonania oznaczenia
- Ilościowe oznaczenie wrażliwości na antybiotyki
- Odwodniona forma antybiotyków zapewniająca wysoką stabilność


Wykaz dostępnych antybiotyków

Nr kat.	Nazwa produktu	Zakres stężeń	Liczba testów
MLT00049	MIC Amikacin	64 - 1 mg/l	36 pasków
MLT00050	MIC Ampicillin	64 - 1 mg/l	36 pasków
MLT00051	MIC Ampicillin/Sulbactam	64/32 - 1/0,5 mg/l	36 pasków
MLT00052	MIC Cefepime	32 - 0,5 mg/l	36 pasków
MLT00053	MIC Ceftazidime	32 - 0,5 mg/l	36 pasków
MLT00054	MIC Cefuroxime	64 - 1 mg/l	36 pasków
MLT00055	MIC Ciprofloxacin	4 - 0,06 mg/l	36 pasków
MLT00056	MIC Clindamycin	4 - 0,06 mg/l	36 pasków
MLT00057	MIC Colistin	16 - 0,25 mg/l	36 pasków
MLT00058	MIC Ertapenem	4 - 0,06 mg/l	36 pasków
MLT00059	MIC Gentamicin	32 - 0,5 mg/l	36 pasków
MLT00060	MIC Imipenem *	8 - 0,12 mg/l	36 pasków
MLT00061	MIC Linezolid	16 - 0,25 mg/l	36 pasków
MLT00062	MIC Meropenem	8 - 0,12 mg/l	36 pasków
MLT00063	MIC Nitrofurantoin	128 - 2 mg/l	36 pasków
MLT00064	MIC Penicillin	4 - 0,06 mg/l	36 pasków
MLT00065	MIC Piperacillin/Tazobactam	128/4 - 2/4 mg/l	36 pasków
MLT00066	MIC Teicoplanin	16 - 0,25 mg/l	36 pasków
MLT00069	MIC Tigecycline	4 - 0,06 ml/l	36 pasków
MLT00067	MIC Trimethoprim/Sulfamethoxazole	8/152 - 0,12/2,38 mg/l	36 pasków
MLT00068	MIC Vancomycin	16 - 0,25 mg/l	36 pasków
MLT00070	MLT Suspension Medium MIC	30x13ml	30x13ml
MLT00071	MLT Suspension Medium MIC G+	30x13ml	30x13ml

Procedura wykonania



* Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem, aby uzyskać więcej informacji

 Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Republika Czeska
Tel.: +420 517 077 111, e-mail: diagnostics@erbamannheim.com
www.eralachema.com

Przedstawicielstwo w Polsce:

Erba Polska Sp. z o.o., ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków
Tel.: +48 510 251 115, erbapolska@erbamannheim.com



Contact info / map



Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia wykorzystane wyłącznie do celów reprezentacyjnych – mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.